




PIL OKR AT v01 171025	Fira Sans Regular 22 pt	 C0 M0 Y0 K90
PIL Okuzell relief eye spray AT	Fira Sans Regular 11 pt	 C0 M0 Y0 K80
Maße: 150 x 200 mmm	Fira Sans Regular 9 pt	 C66 M11 Y100 K0 Pantone 369 C
	Fira Sans Light 9 pt	
	Fira Sans Regular 7 pt	
	Fira Sans Light 7 pt	

OKUZELL



relief

Augenspray mit Liposomen und Euphrasia

Das Produkt bleibt nach der ersten Benutzung steril.

Wirksame Bestandteile

Phospholipidkomplex
Pflanzenextrakte:
– Kapernextrakt (*Capparis spinosa*)
– Strohblume (*Helychrysum italicum*)
– Augentrost (*Euphrasia officinalis*)
– Lakritze (*Glycyrrhiza glabra*)
Isotonische boratgepufferte Lösung auf pH-Wert 7,2
Unkonserviert

Form und Inhalt

Augenlösung 15 ml Sprühflasche

Indikation

Spray zum Aufsprühen auf das geschlossene Auge, basierend auf Liposomen und Pflanzenextrakten. Letztere gelten bei Allergien, ausgelöst durch Pollen, Staub und andere externe Faktoren, als lindernd. Bei regelmäßiger Anwendung des Augensprays bildet sich ein dünner Schutzfilm auf der Augenoberfläche, welcher allergene Stoffe von der Augenoberfläche fernhält.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Halten Sie das Spray in einem Abstand von ca. 10 cm von Ihrem Auge entfernt. Sprühen Sie ein- oder zweimal auf das geschlossene Auge. Wiederholen Sie die Anwendung nach Bedarf mehrmals täglich. Bei der ersten Anwendung nach dem Öffnen ein paar Mal pumpen, um die Düse aufzufüllen.

Nebenwirkungen

Bei gebrauchsmäßiger Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierung bestätigt.

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Benutzen Sie das Produkt nur bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf der Flasche neben dem Symbol der Sanduhr. Bitte trocken und bei Raumtemperatur aufbewahren.


Achtung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Keiner Wärme oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht einnehmen. Nicht anwenden nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Bei Allergien oder Überempfindlichkeiten gegenüber den angegebenen Inhaltsstoffen nicht verwenden. Nicht mit wasserlöslichem Make-up anwenden – die Liposome können Bestandteile des Make-Ups in das Auge transportieren.

Medizinprodukt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pharmaselect Handels GmbH,
Ernst-Melchior-Gasse 20,
A-1020 Wien, Tel: 01-78603860
Email: info@pharmaselect.com
www.pharmaselect.at

 innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln

Vertrieb
Pharmaselect Handels GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
A-1020 Wien



Stand: 10.2017
OKRAT101-01-1710

REV.0.10012.TT.MM.JJJ