

## OKUZELL®

## classic

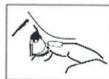
## Augentropfen mit Hypromellose 0,5%

**Beschreibung**

Okuzell Augentropfen bilden einen sterilen, viskoelastischen, klaren Schutzfilm für die Hornhaut. Dadurch bewirken sie eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit mechanischer Beanspruchung, z. B. bei diagnostischen Eingriffen am Auge, bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch, oder bei strapazierten Augen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

**Anwendung**

Die Flasche ist mit einem Sicherheitsring versiegelt. Öffnen Sie die Flasche durch Drehen der Verschlusskappe nach links. Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab. Halten Sie die Flasche mit der Tropföffnung nach unten und geben Sie 3 - 5mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Flaschenboden entfernt werden. Verschließen Sie das Fläschchen nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

**Zusammensetzung**

1 ml enthält: Hypromellose 0,5%, Benzalkoniumchlorid 50%ige Lösung 0,2mg, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat, Natriummonohydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

**Packungsgröße**

Verkaufseinheit: 1 x 10 ml

**Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise**

- Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Sicherheitsring.
- Mit der Tropföffnung der Flasche das Auge nicht berühren.

- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Kontaktlinsen. Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung von Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen müssen Sie vor der Anwendung entfernen und dürfen diese frühestens 15 min nach der Anwendung wieder einsetzen.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/ Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. Okuzell classic Augentropfen sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingepreßt.
- Okuzell classic Augentropfen enthalten Phosphatpuffer. Bei langfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von Okuzell classic zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.
- Die Augentropfen sind nach dem erstmaligen Öffnen des Behältnisses 4 Wochen verwendbar.

**Lagerung**

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen. Verschließen Sie das Fläschchen nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Flasche vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

**LOT** Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingepreßt.

**STERILE A** aseptische Herstellung

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.

 Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Sicherheitsring.

 Lagerungstemperatur

Stand der Information: 11/2017



Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln, Deutschland

Vertrieb in Österreich:  
Pharmaselect Handels GmbH  
Ernst-Melchior-Gasse 20  
1020 Wien, Österreich

**CE 0483**

OKZAT102-04-2201