

OKUZELL



relief

Liposomaler Augenspray mit Pflanzenextrakten

Unkonservierter, feuchtigkeitsspendender und erfrischender Augen- und Lidspray mit Liposomen und Pflanzenextrakten aus Euphrasia, Kapern, italienische Strohblume und Süßholzwurzel. Das Produkt bleibt nach der ersten Benutzung steril.

Indikation

Augen- und Augenlidspray basierend auf Liposomen und Pflanzenextrakten aus Euphrasia, Kapern, italienische Strohblume und Süßholzwurzel. Die enthaltenen Pflanzenextrakte gelten als lindernd bei allergischen Augenreaktionen aufgrund von Pollen, Staub oder anderen Umweltfaktoren. Zur Verringerung von übermäßigem Tränenfluss, Rötungen, Fremdkörpergefühl, Brennen und Jucken der Augen. Bei Verwendung des Produkts bildet sich ein dünner Schutzfilm auf den Augen, der dem Kontakt zwischen den Umweltallergenen und der Augenschleimhaut entgegenwirkt. Die im Produkt enthaltenen Pflanzenextrakte fördern die Wiederherstellung des physiologischen Zustands des Auges und sorgen für eine rasche und lang anhaltende Linderung.

Gebrauchsanweisung

Erstanwendung und Lernphase: Das Produkt wird mit einem gaslosen Sprühsystem verabreicht; daher kann es notwendig sein, den Knopf wiederholt zu drücken, um die erste Abgabe zu erreichen. Bei dieser Gelegenheit ist es ratsam, den Sprühstrahl auf die Handfläche zu richten, um den richtigen Druck zu prüfen, der für eine optimale Zerstäubung erforderlich ist. Ein unüberlegter Druck auf den Knopf hat keine ideale Wirkung. Waschen Sie sich gründlich die Hände. Vor Gebrauch schütteln. Halten Sie die Flasche so fest, dass Ihr Daumen (oder Zeigefinger) fest auf dem Knopf sitzt und achten Sie darauf, dass Sie die Auslassöffnung nicht bedecken. Mit festem Druck aus einem Abstand von ca. 10-15 cm in frontal-seitlicher Position auf das Auge sprühen, so dass der Sprühstoß auf Auge, Augenlid und Augenpartie gleichmäßig verteilt wird. Es wird empfohlen, bei jeder Anwendung

zweimal zu sprühen, einmal oder mehrmals am Tag. Nicht mit nicht-wasserfestem Make-up verwenden, da die Liposomen Bestandteile des Make-ups in die Augen transportieren können.

⚠ Warnhinweise

Bei Augenreizungen die Anwendung einstellen und einen Facharzt aufsuchen. Nicht anwenden bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Vor jeder Anwendung die Hände waschen. Von Wärmequellen fernhalten und an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufbewahren. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt zu sein scheint. Die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Gebrauch aufbrauchen. Die Verpackung gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgen.

Zusammensetzung

Phospholipidkomplex, Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumchlorid, Pflanzenextrakte aus Euphrasia, Kapern, italienische Strohblume und Süßholzwurzel. Isotonische gepufferte Lösung auf pH-Wert 7,2. Enthält Sojalecithin. Nicht konserviert.

Form und Inhalt

Augenlösung 15 ml Sprühflasche

MEDIZINPRODUKT

Text Rev.02 10.01.22

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pharmaselect Handels GmbH,
Ernst-Melchior-Gasse 20,
A-1020 Wien, Tel: 01-78603860
Email: info@pharmaselect.com
www.pharmaselect.at

Vertrieb
Pharmaselect Handels GmbH
Wien, Österreich



Stand: 01.2022
OKRAT101-02-2201